

Bruksanvisning Schine Walk

Läs igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda Schine Walk. Den innehåller information som är viktigt för dig. Följ noggrant instruktionerna och spara bruksanvisningen. Du kan behöva läsa den igen.

Schine Walk är en innovativ kryckfot med dämpning och kan monteras på de flesta kryckor och käppar. Designen erbjuder en smidig och mer skonsam gång. Det kan bidra till en minskad påverkan på tex händer, axlar och nacke. Tack vare den större anläggningsytan tar du dig tryggare fram i de flesta miljöer, oavsett om du använder en eller två kryckor. Den högre friktionen i jämförelse med standard doppskor ger ett bra grepp på många underlag. Kryckfoten finns även med dubb för vinterbruk.

I bruksanvisningen finns information om följande:

- Schine Walks olika delar och dämpning
- Produktfakta
- Specifikationer
- Montering
- Byte av dämpare
- Kontroll av Schine Walk
- Var försiktig

Schine Walks olika delar och dämpning

Hållare

Hållaren monteras på kryckans/käppens skaft. Den skruvas fast med en mutter och fäster ordentligt tack vare hylsan. Passar skaft med en diameter på 17 mm eller 19,5 mm. Botten är metallförstärkt. I hållaren klickar man i den utbytbara dämparen.

Dämpare


Dämparen, den skålformade nedre delen av Schine Walk, är tillverkad dels i en mjukare plast med hög friktion, dels i en hårdare plast för att kunna klickas fast i hållaren. Vid belastning formar den sig efter underlaget och ger en större anläggningsyta, vilket gör att gången upplevs tryggare.

Dämpare medium (blå): Mjukare dämpning som passar då man inte belastar kryckan hårt vid gång och /eller vill ha en mer följsam dämpning. Tex som stöd för balansen eller då man går med protes.


Dämpare fast (röd): Erbjuder en stadig och stabil dämpning för ökat motstånd i svikten vid varje steg. Passar då man belastar med större kraft. T ex då man endast stödjer sig på ett ben eller har en kraftigare gång, exempelvis vid träning.

Dämpare dubb (svart): Särskilt anpassad för vinterunderlag. Skruvdubb från Bestgrip® är monterad på en fast dämpare. OBS, endast för utomhusbruk.

Maximal användarvikt är 140 kg

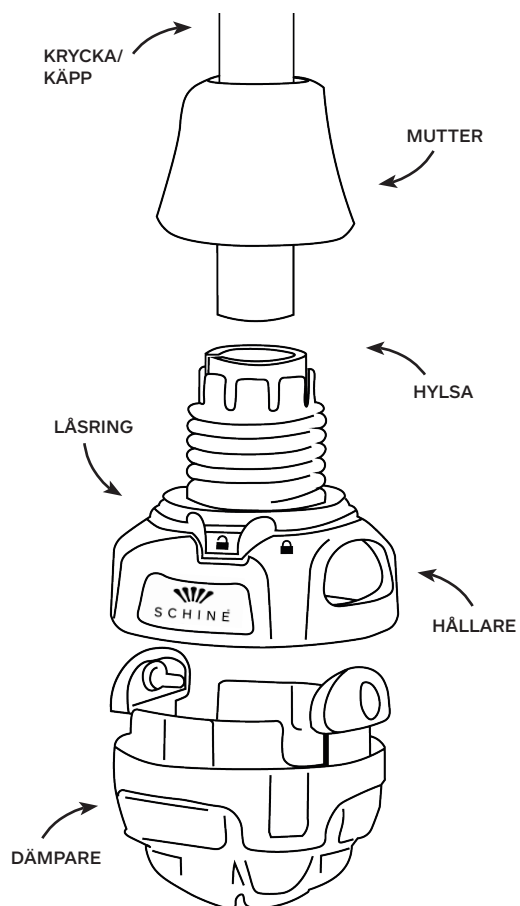

Schine Walks patenterade dämpning:

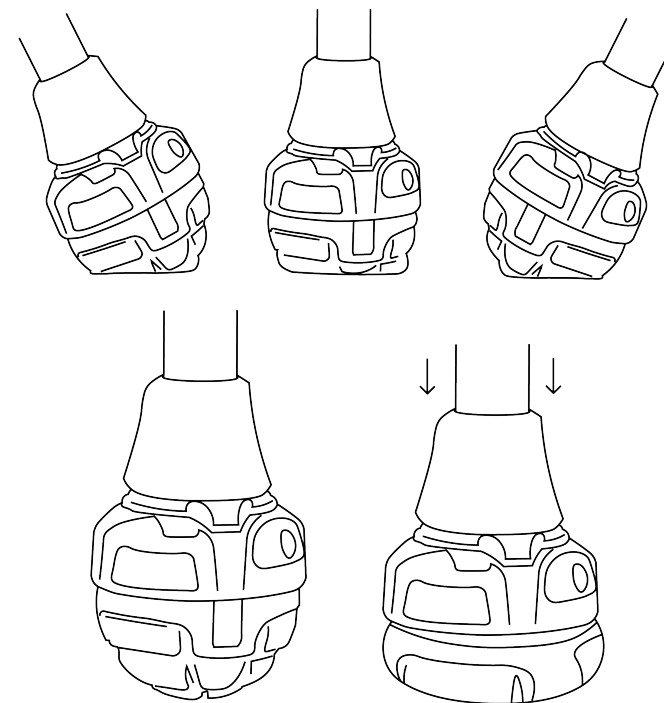

- Mjuk följsam isättning
- Större anläggningsyta
- Unik dämpning vid tryck
- Lätt rekyl

PRODUKTFAKTA

- Kryckfoten består av en hållare och en utbytbar dämpare.
- Stor anläggningsyta.
- Dämpare med hög friktion.
- 2 varianter av dämpning, medium och fast.
- Dubbad dämpare för vinterunderlag.
- Förstärkt botten i hållaren.
- Max användarvikt 140 kg.
- Rengör med vatten och torka torr innan användning.


SPECIFIKATIONER

Vikt: 89g
Längd: 95 mm
Bredd: 56 mm
Höjd: Monterad bygger 60 mm
Passar skaft med diameter: 17mm eller 19,5mm
Material: Återvinningsbara plaster
Övrigt: Tillverkas i Sverige
Patent
Basic UDI-DI



Montering

Tänk på att Schine Walk bygger 6 cm från skaftets slut till underlaget. Kryckan/käppens längd måste justeras med hänsyn till det. På hållaren sitter låsringen. Det finns två symboler präglade, en för upplåst läge – ett öppet hänglås och en för låst läge – ett låst hänglås.

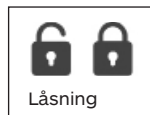


Låsning

Montering av komplett Schine Walk

Mät diametern på skaftet, se mått nedan.

1. Välj hylsa A \varnothing 19,5 mm eller hylsa B \varnothing 17 mm.
2. Tryck ned hylsan i botten på hållaren.
3. Trä muttern på skaftet.
4. Tryck ned kryckan i botten på hållaren.
5. Skruva fast muttern på hållaren.

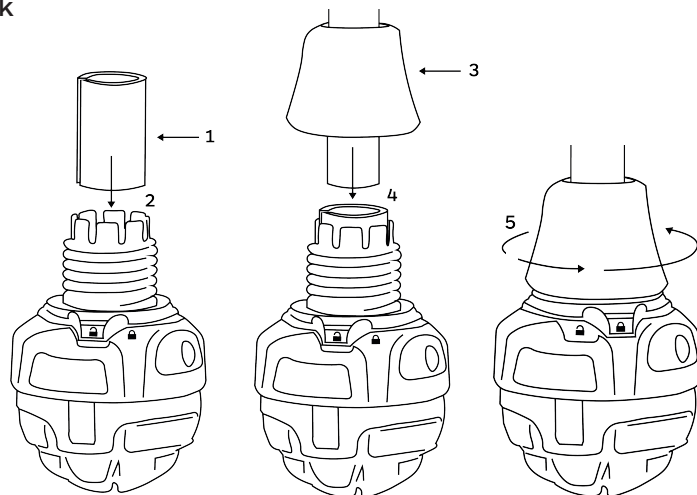


Mät skaftet här:

Skala 1:1



Använd den tunnare hylsa A.

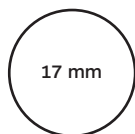

Använd den tjockare hylsa B.

Se monteringsfilm:



Byte av dämpare


FRIGÖR DÄMPARE

Underlättar om du vänder Schine Walk uppåt.

1. Vrid låsringen till upplåst läge.
2. Tryck ur snäppena, ett i taget.
3. Lossa dämparen genom att dra nedåt.

KLICKA I NY DÄMPARE

4. OBS, låsringen ska vara i upplåst läge.
5. Lägg i dämparen lätt vinklad.
6. Centra färgkoden i hålet på hållaren.
7. Pressa in dämparen ovanifrån.

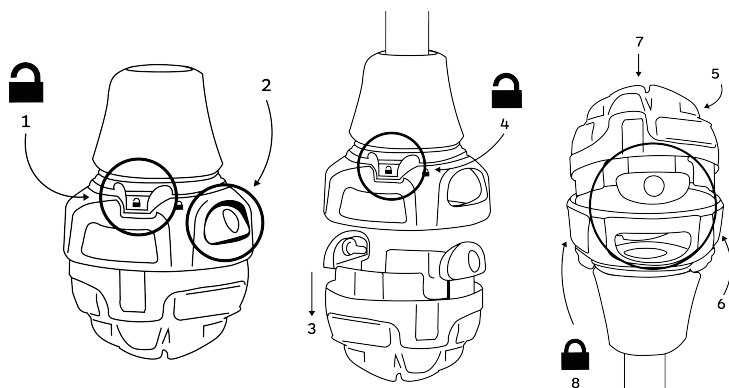

Säkerhetskontroll av Schine Walk innan användning

1. Kontrollera att Schine Walk sitter fast på kryckan genom att dra i kryckfoten.
2. Se till att båda snäppena hämnat i avsedda hål.
3. Låsringen skall vara i låst läge.


Kontrollera Schine Walk regelbundet

Hållaren

Skruva av muttern och kontrollera eventuellt slitage av hylsan och att den sitter i rätt läge. Om hylsan är sliten och inte bidrar till att hållaren sitter ordentligt fast på kryckan skall den bytas.

Dämparen

Den skall bytas ut om dämpningen försämrats och när den är sliten eller blivit skadad. Om inte detta görs kan inte funktionen garanteras.

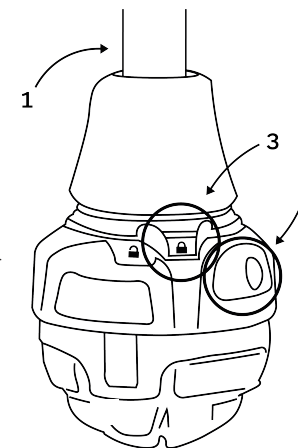

VAR FÖRSIKTIG!

Även om Schine Walks dämpare har en hög friktion och ger ett bra grepp. Var uppmärksam på potentiella faror som kan uppstå, särskilt vid fuktiga, hala eller ojämna underlag.


Dämpare med dubb skall endast användas utomhus då det finns en risk att halka inomhus.

Innan användning säkerställ att kryckfoten är hel, ren och rätt monterad. Förvara ej Schine Walk nära en värmekälla.

Schines hjälpmedel för enklare tablethandtering:



Schine Pillbox L

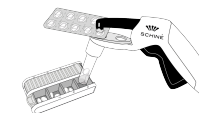

Schine Pillbox S och Schine PillPopper



Milmas AB
Stigaregatan 7B
SE-791 60 Falun
+46(23)697 90
info@schine.se
schine.se

SCHINE
My life products



Bruksanvisningen är senast upprättad 17/3/2024