



# SCHINE<sup>®</sup> WALK

## Skonsam och trygg gång

Schine Walk är en innovativ kryckfot med dämpning och kan monteras på de flesta kryckor och käppar. Designen erbjuder en smidig och mer skonsam gång.

Det kan bidra till en minskad påverkan på tex händer, axlar och nacke. Tack vare den större anläggningsytan tar du dig tryggare fram i de flesta miljöer, oavsett om du använder en eller två kryckor.

Den högre friktionen i jämförelse med standard doppskor ger ett bra grepp på många underlag. Kryckfoten finns även med dubb för vinterbruk.

### PRODUKTFAKTA

- Kryckfoten består av en hållare och en dämpare.
- Stor anläggningsyta.
- Goda antihalkegenskaper.
- 2 varianter av dämpning, medium och fast.
- Dubbad dämpare för vinterunderlag.
- Förstärkt botten i hållaren.
- Max användarvikt 140 kg.
- Rengör med vatten och torka torr innan användning.

### SPECIFIKATIONER

**Vikt:** 89 g

**Passar skaft:** Med diameter Ø 17mm och Ø19,5 mm.

**Bygger på höjden:** 6 cm.

**Material:** Återvinningsbar plast.




Patent



## Montering av komplett Schine Walk

Mät diametern på skaftet.

1. Välj hylsa A Ø19,5 mm eller hylsa B Ø17 mm.
2. Sätt hylsan i hålet i hållaren.
3. Trä muttern på skaftet.
4. Tryck ned skaftet i botten på hållaren.
5. Skruva fast muttern på hållaren.

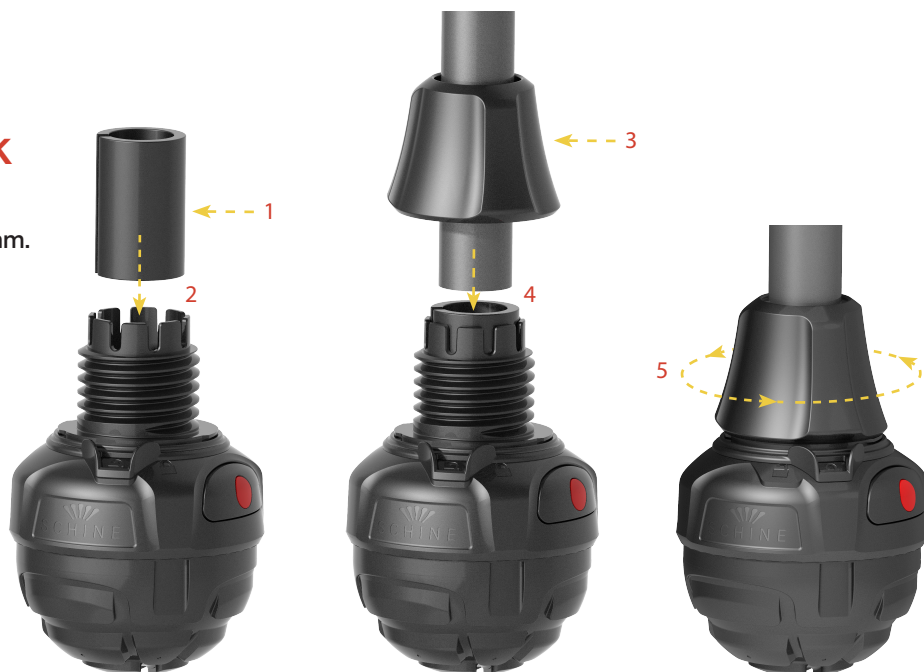

Se monteringsfilm:




## Byte av dämpare

### FRIGÖR DÄMPAREN

1. Vrid låsringen till upplåst läge.
2. Tryck in snäppena, ett i taget.
3. Dämparen lossnar.

### KLICKA I DÄMPAREN

4. OBS! Låsringen ska vara i upplåst läge.
5. Lägg i dämparen lätt vinklad.
6. Centra färgkoden i hålet på hållaren.
7. Pressa in dämparen ovanifrån.
8. Vrid låsringen till låst läge.

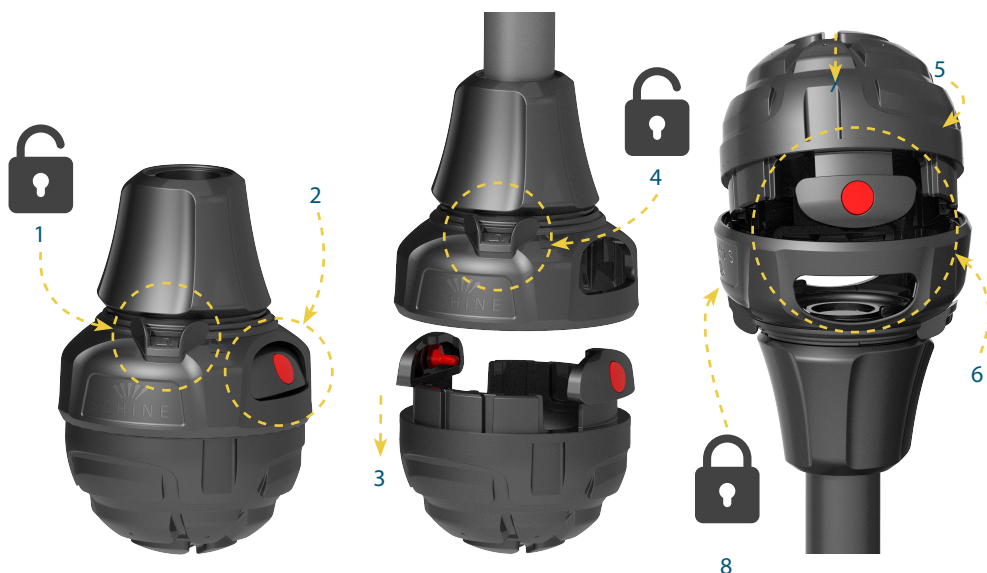

## Säkerhetskontroll innan användning

- Kontrollera att kryckfoten sitter fast på kryckan.
- Se till att båda snäppena hamnat i avsedda håll.
- Låsringen ska vara i låst läge.
- Kontrollera dämparen efter en tids användning – den ska bytas ut om dämpningen försämrats och när den är slitet. Om detta ej görs kan inte funktion och säkerhet säkerställas.

### VAR FÖRSIKTIG!

Även om Schine Walks dämpare har en hög friktion och ger ett bra grepp. Var uppmärksam på potentiella faror som kan uppstå, särskilt vid fuktiga, hala eller ojämna underlag. Dämpare med dubb skall endast användas utomhus då det finns en risk att halka inomhus. Innan användning säkerställ att kryckfoten är hel, ren och rätt monterad. Förvara ej Schine Walk nära en värmekälla.



Läs mer  
på [schine.se](http://schine.se)

  
**SCHINE**  
*My life products*

Milmas AB  
Stigaregatan 7B  
SE-791 60 Falun  
Tel: +46(23)697 90  
Mail: [info@schine.se](mailto:info@schine.se)